

ÉLÉMENTS


DE VOTRE BladeFLASK:

BORD COUPANT
ORIENTÉ VERS LA DROITE

CET ÉLÉMENT
EST APPELÉ
SOIE ET DOIT
ÊTRE
ORIENTÉ
VERS LE HAUT

INDICATEUR

COUSSINET

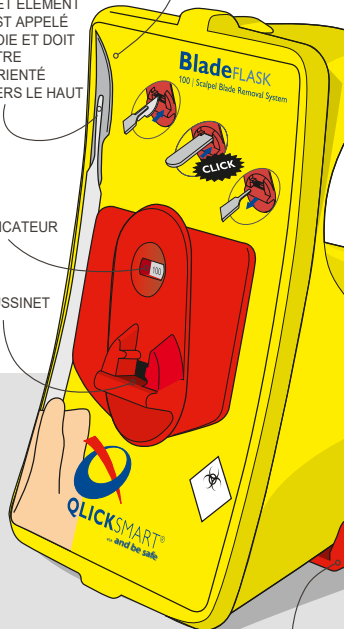

SUPPORT DE
FIXATION

FIXER

AU MUR OU SUR UN CHARIOT :

1. Si vous n'avez pas monté votre BladeFLASK préalablement, préparez le support de montage*.

A LA BASE DU SUPPORT
COMPORTE UN ADHÉSIF
DOUBLE FACE

B OU UTILISER DES
VIS.

* Voir le modèle d'adaptation et les instructions
dans l'emballage du support.

2. Le BladeFLASK
peut être fixé au
mur, sur un
chariot ou à la
table.



FAIRE
GLISSER
DANS LE
SUPPORT


ENFONCER
DANS LE
SUPPORT

N.B: Monter
BladeFLASK sur le
support de montage
pendant l'utilisation

EXTRAIRE LA LAME

À UNE SEULE MAIN:


1. Placer la lame sur le coussinet
avec le bord coupant
orienté vers la droite
(ou « soie » vers
le haut).

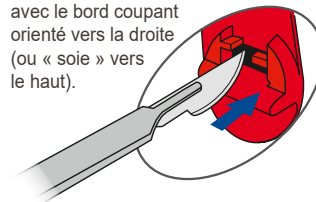

2. Pousser le manche
du scalpel dans
le BladeFLASK
jusqu'au clic.



3. Extraire le manche.

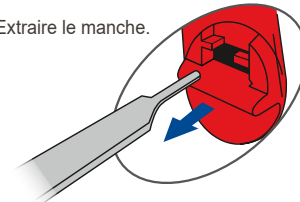

N.B:

* Étape 3 assurer l'enlèvement et inclusion de la lame
dans le BladeFLASK.

* BladeFLASK doit être utilisé avec le support de
montage.

* Le BladeFLASK est éliminé comme déchet médical
après l'insertion de 100 lames