



Wash-Checks® U

Indicateurs du processus de nettoyage

REF WC 108

Mode d'emploi

INDICATIONS

Les indicateurs de nettoyage jetables 'Wash-Checks U' sont conçu pour surveiller l'efficacité du processus de nettoyage dans les bains de nettoyage à ultrasons.

UTILISATION SUGGÉRÉE

Contrôle quotidien des bains de nettoyage à ultrasons pour la libération de chaque bain à ultrasons, et routine pendant la journée pour la libération des charges.

CONTRÔLE QUOTIDIEN POUR LIBÉRATION DES BAINS À ULTRASONS.

1. Placez les indicateurs Wash-Checks U dans le support prévu, de manière à ce que la carré bleu soit entièrement visible.
2. **Placez les Wash-Checks U et leur support dans le bain à ultrasons** avec un liquide de nettoyage, sans instruments. Assurez-vous que le carré bleu reste vers le haut.
3. Démarrez un cycle de nettoyage à Ultrason normal.
4. À la fin du cycle, retirez les Wash-Checks U et leur support du bain à ultrasons afin d'examiner les résultats. Si le cycle de nettoyage a été efficace, le carré bleu de test devrait disparaître.
5. Consignez les Wash-Checks U sur la feuille de données appropriée. Conservez-la dans un dossier permanent.

CONTRÔLE DE ROUTINE DE LIBÉRATION DES CHARGES

1. Placez les indicateurs Wash-Checks U dans le support prévu, de manière à ce que la carré bleu soit entièrement visible.
2. **Placez les Wash-Checks U et leur support dans le bain à ultrasons par-dessus les instruments.** Assurez-vous que le carré bleu reste vers le haut.
3. Traiter la charge de nettoyage par ultrasons selon la procédure normale.
4. À la fin du cycle, retirer les Wash-Checks U et leur support du bain à ultrasons afin d'examiner les résultats. Si le cycle de nettoyage a été efficace, le carré bleu de test devrait disparaître.
5. Consignez les Wash-Checks U sur la feuille de données appropriée. Conservez-la dans un dossier permanent.

INTERPRETATION DES RESULTATS

Examinez l'indicateur de test pour vous assurer qu'il n'y a pas de bleu restant. Dans un cycle de nettoyage à ultrasons efficace, la zone bleue du carré devrait disparaître. La présence d'une grande quantité de bleu restant sur l'indicateur indique que l'efficacité du nettoyage par ultrasons a été insuffisante. Une petite quantité de bleu restante indique un fonctionnement moins efficace du bain à ultrasons.



Moniteur non utilisé ou résultat faible / critique (le carré est entièrement bleu)



Résultat inéquivalent (il reste du bleu dans le carré)



Résultat optimal (pas de bleu dans le carré)

STOCKAGE ET MANIPULATION

- Stockez les indicateurs Wash-Checks U dans le sac de protection fourni, à une température ambiante entre 10° et 38°c.
- Ne retirez pas les indicateurs de leur sac avant qu'ils ne doivent être utilisés.
- Tenir à l'écart des désinfectant et fumées.

DATE D'EXPIRATION

La date de validité est imprimée sur l'emballage du produit.

SteriTec Products, Mfg. Co., Inc.
74 Inverness Drive East
Englewood, CO 80112
(303) 660-4201 FAX (303) 660-4213