

### Gebruiksaanwijzing

#### INDICATIES VOOR GEBRUIK

De disposable Wash-Checks U indicatoren zijn ontworpen om de efficiëntie van het reinigingsproces in ultrasone reinigingsbaden te evalueren.

#### AANBEVOLEN GEBRUIK

Dagelijkse evaluatie van het reinigingsproces van elk ultrasoonbad, en routinematig, gedurende de dag, voor vrijgave van de lading.

#### DAGELIJKS VOOR VRIJDAGE ULTRASOONBAD

1. Plaats de Wash-Checks indicator in de Wash-Checks houder, zodat het BLAUWE VIERKANT volledig zichtbaar is.
2. **Plaats de Wash-Checks U en de houder in een instrumentenmand in het ultrasoonbad met reinigingsvloeistof zonder instrumenten.** Zorg ervoor dat het blauwe vierkant naar boven is gericht.
3. Start een normale, ultrasone reinigingscyclus.
4. Haal de Wash-Checks U en houder aan het einde van de cyclus uit de reiniger en bekijk de resultaten. Indien de reinigingscyclus effectief was, moet het blauwe vierkant verdwenen zijn.
5. Bevestig de Wash-Checks indicator aan het Wash-Checks U registratieblad en vul de juiste informatie in. Bewaar dit als permanent bewijs.

#### ROUTINEMATIG VOOR VRIJGAVE LADING

1. Plaats de Wash-Checks U test strip in de Wash-Checks houder, zodat het BLAUWE VIERKANT volledig zichtbaar is.
2. **Plaats de Wash-Checks U en de houder in een instrumentenmand in het ultrasoonbad bovenop de instrumenten.** Zorg ervoor dat het blauwe vierkant naar boven is gericht.
3. Verwerk de inhoud van de ultrasone reiniger volgens de normale procedure.
4. Haal de Wash-Checks U en houder aan het einde van de cyclus uit de reiniger en bekijk de resultaten. Indien de reinigingscyclus effectief was, moet het blauwe vierkant verdwenen zijn.
5. Niet de Wash-Checks U test strip op het Wash-Checks U Record Sheet en vul de juiste informatie in. Te bewaren als bewijs.

#### INTERPRETATIE VAN DE RESULTATEN

Controleer de indicator en ga na of er nog een deel van de blauwe testvlek overblijft. Bij een efficiënte ultrasone reinigingscyclus, is het blauwe vierkant verdwenen. De aanwezigheid van een grote hoeveelheid van de blauwe testvlek betekent dat de reinigingscyclus niet efficiënt was. Indien er een kleine hoeveelheid blauw overblijft, wijst dit op een minder efficiënte werking van het ultrasoonbad.



Ongebruikte indicator of kritisch/slecht resultaat (volledige blauwe vierkant is zichtbaar)



Ontoereikend resultaat (er rest nog blauw in het vierkant)



Optimaal resultaat ( geen blauw in het vierkant)

#### OPSLAG EN STOCKAGE

- Bewaar de Wash-Checks U indicatoren op kamertemperatuur (10° - 38°C) in hun oorspronkelijke, beschermende folie. Haal de indicator niet uit de folie tot juist voor gebruik.
- Niet in de nabijheid van ontsmettingsmiddelen en dampen houden.

#### VERVALDATUM

De vervaldatum wordt vermeld op de productverpakking.

*SteriTec Products, Mfg. Co., Inc.  
74 Inverness Drive East  
Englewood, CO 80112  
(303) 660-4201 FAX (303) 660-4213*