

RETRAITEMENT



Laveur-désinfecteur d'endoscope ISA™

Laveur-désinfecteur traversant d'endoscopes ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru

Enceinte de séchage et stockage ENDODRY™

Systèmes de transport pour les endoscopes CLEANASCOPE®

ISA™

Laveur désinfecteur d'endoscope



DUOMED

Duomed Swiss AG

Grenzstrasse 5a, 6214 Schenkon

Tel. +41 (0)41 510 07 00

www.duomed.com

Retraitement



 **CANTEL**

LE LAVEUR ISA™

LA (R)ÉVOLUTION NÉCESSAIRE

Depuis plus de 20 ans, Medivators se consacre au développement et à la fourniture de solutions innovantes dans le domaine de la prévention et du contrôle des infections dans le monde entier.

Le Laveur Désinfecteur ISA™ est la solution Cantel pour un nettoyage et une désinfection rapide, efficace et maîtrisée de vos endoscopes flexibles, conçue pour les unités d'endoscopie exigeant la technologie la plus avancée.

Conçu pour être conforme à la norme UNI EN ISO 14937, le reprocesseur d'endoscope ISA™ assure une stérilisation chimique à froid avec un niveau d'assurance de stérilité 10-6.

Le Laveur Désinfecteur ISA™ assure:

- Haute normes de qualité pour l'opérateur, les endoscopes et les patients.
- Réduction des coûts liés aux infections hospitalières



LE CERCLE COMPLET DE PROTECTION PROTECTION

En tant que chef de file mondial en matière de prévention des infections, **seul Cantel offre le Cercle complet de protection**, un partenariat proactif à valeur ajoutée qui vise à vous aider à éliminer les risques, à rationaliser l'efficacité opérationnelle et à optimiser votre réussite.

RETRAITEMENT La désinfection de haut niveau est une exigence de prévention des infections en endoscopie. Les technologies de retraitement de Cantel sont conçues pour respecter les normes de désinfection de haut niveau en vigueur. Elles optimisent le flux de travail grâce à leur interface utilisateur, ergonomie et prise en charge d'une vaste gamme d'appareils.

Laveur désinfecteur d'endoscopes ISA™

La solution de Cantel rapide et flexible

FONCTIONNEMENT SIMPLE, RAPIDE ET OPTIMISÉ

- Cycle stérilisation complet dans 19 minutes avec surveillance de canaux
- Cycle stérilisation et nettoyage complet dans 25 minutes avec surveillance de canaux
- Cycle désinfection et nettoyage complet dans 20 minutes avec surveillance de canaux
- Simple et facile à utiliser
- Insertion des endoscopes et information sur le fonctionnement via le système RFID - permet d'éviter les erreurs et de gagner du temps




CONCEPTION COMPACTE ET ERGONOMIQUE POUR LA CONFORT DE L'UTILISATEUR

- Une grande cuve facile à charger accueille la plupart des marques d'endoscopes flexibles
- L'interface intuitive garantit un accès aisé et rapide à toutes les informations sur le cycle
- Sa taille compacte permet une installation, un fonctionnement et une maintenance aisés



SÉCURITÉ GARANTIE POUR LES OPÉRATEURS, PATIENTS ET ENDOSCOPES

- Opération mains libres et technologie basée RFID pour une prévention des contaminations croisées
- Traçabilité grâce à l'enregistrement imprimé et électronique des données du cycle
- Processus validé, conforme aux normes UNI EN ISO 15883-1/4 et UNI EN ISO/TS 15883-5 (autrichien, allemand, français: sol d'essai)

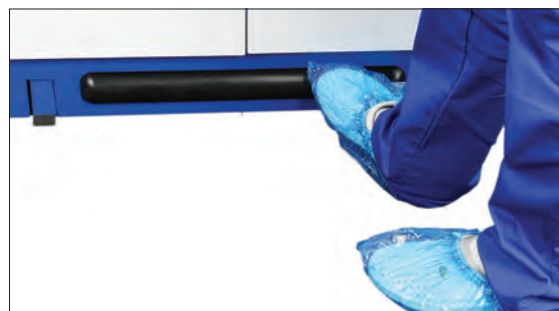


LA FORMULE POUR UN RÉSULTAT OPTIMAL

- Des produits chimiques efficaces à température ambiante et compatibles avec la grande majorité des endoscopes
- Consommation optimisée de l'eau et des produits chimiques
- Spécialement élaborée en vue d'une utilisation avec le laveur désinfecteur ISA™ (UNI EN ISO 14937)



CARACTÉRISTIQUES DU LAVEUR-DÉSINFECTEUR POUR ENDOSCOPES ISA™

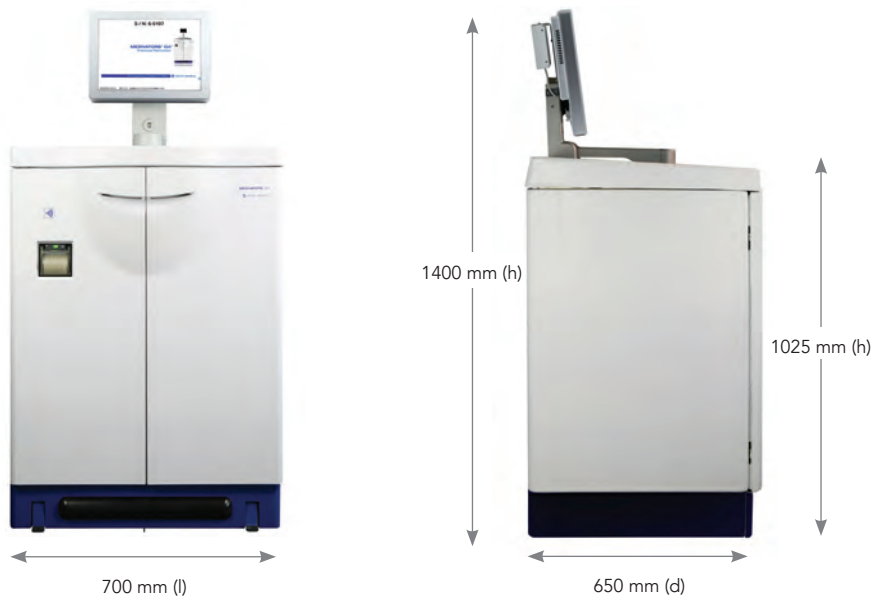

Dimensions
700 mm (l) x 1400 mm (h) x 650 mm (d) - écran inclus
Poids
75 kg
Besoins en électricité
100 V-240 V, 50-60Hz
Température ambiante de fonctionnement
5° - 40° C
Humidité
20 - 80%
Temps de retraitement
env. 22 minutes (cycle désinfection complet)
16 minutes (désinfection rapide)*

*Temps dépendant des paramètres individuels du processus, par exemple la qualité de l'eau, la chimie, etc

Capacité de traitement
1 endoscope par cycle
Désinfection/stérilisant de haut niveau
ISASPOR™ Single-shot Désinfectant / stérilisant, en deux parties acide peracétique et ISAZONE™ Activator.
Détergent
ISACLEAN™ Détergent, détergent multienzymatique

LISTE DES RÉFÉRENCES D'ARTICLES RELATIVES AU LAVEUR DÉSINFECTEUR ISA™		
NUMÉRO D'ARTICLE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
500187	ISASPOR™ Désinfectant / Stérilisant à Injection Unique de Haut Niveau	1 x 10L Sol. A+B
500188	ISASPOR™ Désinfectant / Stérilisant à Injection Unique de Haut Niveau	1 x 5L Sol. A+B
500189	ISACLEAN™ Détergent	2 x 5L
500019	ISACLEAN™ Détergent	1L
93250-222	Kit de filtres CPC ISA™	0,45µm + 0,1µm
ISAF01REV.1	ISA™ filtres d'eau	0,1µm
ISAF045REV.1	ISA™ filtres d'eau	0,45µm
ISA4400	ISA™ filtres à air	1
ISAROTS2	Rouleau de papier d'imprimante laveur désinfecteur ISA™	1

ISA™, ISASPOR™, ISAZONE™ et ISACLEAN™ sont des marques déposées de Cantel Medical (Italy)
© 2017-2021 Cantel. Tous droits réservés. Le Cercle Complet de Protection est une marque commerciale détenue par Cantel Medical et protégée par les droits d'auteur enregistrés aux États-Unis et par des traités internationaux dans les autres pays et il appartient à Cantel Medical Corp.



ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru

Laveur-désinfecteur d'endoscopes | **Retraitement**



Le retraitement repensé

Conception moderne

Technologie validée

Flux de travail Marche en avant

Résultats fiables



DUOMED

Duomed Swiss AG
Grenzstrasse 5a, 6214 Schenkon
Tel. +41 (0)41 510 07 00
www.duomed.com



CANTHEL



LE CERCLE DE PROTECTION

Spécialiste de la prévention des infections, Cantel fournit une gamme complète de dispositifs de protection, un partenariat destiné à optimiser votre organisation opérationnelle et vous accompagner dans la maîtrise des risques.

CANTEL EST VOTRE PARTENAIRE DANS LE COMBAT CONTRE LES INFECTIONS ASSOCIÉES AUX SOINS (IAS).

Les IAS sont un problème complexe et persistant dans les établissements de santé. Réduire le risque d'infection pour les patients en endoscopie est d'une importance cruciale. Plus d'IAS et d'épidémies ont été liées à des endoscopes contaminés qu'à tout autre appareil médical.¹

Avec plus de 35 ans d'expérience en prévention des infections, Cantel comprend la complexité du retraitement des endoscopes. Nous offrons une large gamme de produits de retraitement d'endoscopes, y compris des détergents, des désinfectants, des laveurs-désinfecteurs d'endoscopes, des systèmes de transport, des armoires de séchage et de stockage et des systèmes de suivi d'endoscopes.

Nos offres de produits, de services et de formation se retrouvent intégralement dans notre cycle de protection, CANTEL propose des solutions afin de tenter d'améliorer le flux de traitement et son efficacité.

Le retraitement repensé

CONCEPTION MODERNE

La séparation physique des environnements propres et sales dans une zone de retraitement des endoscopes est une meilleure pratique de prévention des infections reconnue à l'échelle mondiale², capable de réduire le risque d'erreur humaine, de distraction et de défaillances imprévues pouvant entraîner la recontamination d'endoscopes propres.

TECHNOLOGIE VALIDÉE

Le laveur-désinfecteur traversant ADVANTAGE PLUSTM tire parti de la technologie éprouvée du LDE ADVANTAGE PLUSTM, validée selon les dernières normes en vigueur pour la conception des LDE.

FLUX DE TRAVAIL MARCHÉ EN AVANT

Le LDE traversant ADVANTAGE PLUSTM normalise un flux de travail unidirectionnel, en séparant par une paroi rigide la zone contaminée de la zone propre. Cela permet de réduire les risques de contamination croisée dans le retraitement des endoscopes.

RÉSULTATS FIABLES

Le LDE ADVANTAGE PLUSTM est conforme aux directives industrielles établies pour la désinfection^{2,3,4}. Il a été cliniquement prouvé qu'il permettait une désinfection de haut niveau de la grande majorité des marques et modèles d'endoscopes flexibles⁵, ainsi que d'autres dispositifs médicaux et instruments chirurgicaux.

**Plus de 35 ans
d'expérience
dans le
traitement des
endoscopes**

RETRAITEMENT

La désinfection de haut niveau est une exigence de prévention des infections en endoscopie. Les technologies de retraitement de Cantel sont conçues pour respecter les normes de désinfection de haut niveau en vigueur. Elles optimisent le flux de travail grâce à leur interface utilisateur, ergonomie et prise en charge d'une vaste gamme d'appareils.

Une solution novatrice pour un processus évolutif

L'instrumentation médicale progressant, les méthodes que nous utilisons pour nettoyer et désinfecter ces instruments sont en perpétuel amélioration. La conception du LDE traversant ADVANTAGE PLUS™ prend en charge un processus de flux de travail efficace afin de réduire les erreurs humaines, la distraction et les défaillances involontaires dans les protocoles de nettoyage¹. La barrière à paroi dure entre les zones de retraitement contaminées et propres crée un flux de travail unidirectionnel et peut réduire le risque de recontamination, garantissant des endoscopes sûrs et prêts pour le patient, pour chaque procédure.

Traçabilité informatisée grâce au logiciel ENDOLINE™ répondant aux dernières recommandations de traçabilité en vigueur.

La conception ergonomique et les grandes cuves faciles à charger facilitent le confort de l'opérateur.

Test d'étanchéité continu pendant le cycle. Permet en outre de limiter les potentielles infiltrations dans un endoscope endommagé.

La télémaintenance permet une assistance technique et un entretien rapides et efficaces, en maximisant la disponibilité du LDE.



La cassette de transport pratique réduit la manipulation et aide à prévenir les dommages et le risque de contamination de l'endoscope.


Grand écran affichant des informations de cycle en temps réel

Les deux cuves asynchrones pour faciliter les flux de traitement.

Fonctionnement mains libres et démarrage automatique du cycle pour une utilisation facile.

Lecteur RFID et lecteur de code-barres pour une saisie des données rapide et précise (par exemple, endoscope, opérateur, patient et médecin) pour la gestion du cycle et la traçabilité.

Le tiroir coulissant permet un accès facile pour remplacer les produits chimiques.

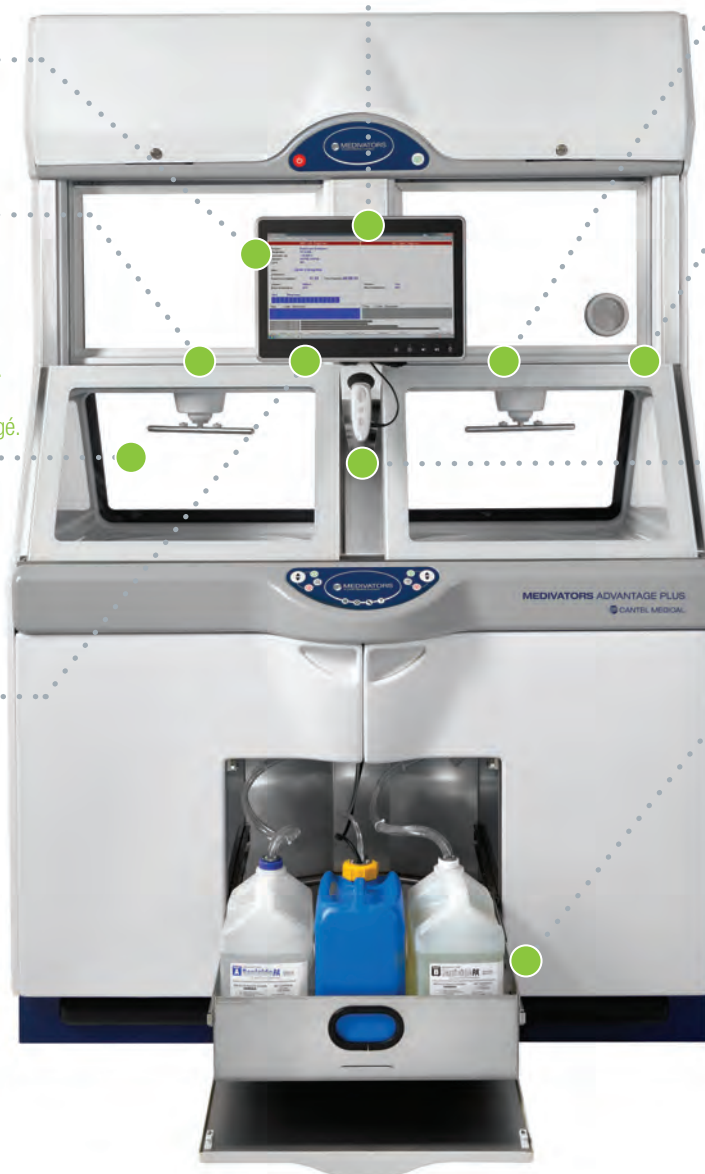

La surveillance continue du canal et la détection du blocage garantissent que tous les canaux de l'endoscope sont désinfectés à haut niveau.

Laveur-désinfecteur d'endoscopes ADVANTAGE PLUS™

Caractéristiques du système

Dimensions

200 x 130,6 x 79,2 cm (HxLxP)

Poids

400 kg

Exigences électriques

120 V CA $\pm 10\%$, monophasé, 60 Hz, 1200 watts

Certifications de sécurité électrique

Homologation ETL Intertek n°75811

Norme UL 61010-1

Norme EN 61010-1

Norme CSA/CAN C22.2, n° 61010-1

Alimentation en eau

Débit minimum : 5 l/min entre 2 à 6 bars

Température de l'eau : 35 °C $\pm 2^\circ\text{C}$

Alimentation en air

4 à 10 bars, débit mini 0,71 l/s

Compresseur d'air optionnel disponible



Côté propre

Références du laveur-désinfecteur d'endoscopes ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru

Numéro d'articles	Description
ADVPT-3007	Laveur-désinfecteur d'endoscopes ADVANTAGE PLUS™, 120 V (avec compresseur d'air)
ADVPT-3008	Laveur-désinfecteur d'endoscopes ADVANTAGE PLUS™, 120 V (sans compresseur d'air)

Accessoires

Numéro d'articles	Références
ML02-0117	Désinfectant haut niveau RAPICIDE™ PA 4 bidons/carton - 2 parties A, 2 parties B
ML02-0116	Désinfectant haut niveau RAPICIDE™ PA 4 bidons/carton - 2 parties A, 2 parties B
ML02-0118	Bandelettes de test RAPICIDE™ PA (2 flacons/carton, 100 bandelettes/flacon)
ML02-0145	Détergent INTERCEPT™ PLUS 2 bouteilles/paquet (2 bidons/carton)
CAS-1000	Cassette plastique pour transport de l'endoscope

1 Rutala, W.A., Weber, D. J., and the Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (2008). Guideline for Disinfection and Sterilization in Healthcare Facilities (dernière mise à jour : 15 février 2017). Disponible CDC : <https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/disinfection-guidelines.pdf>
2 UK Department of Health (2016). Health Technical Memorandum 01-06 : Decontamination of flexible endoscopes: Part B – Design and installation. Disponible : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530420/HTM0106_PartB.pdf
3 Association for the Advancement of Medical Instrumentation and American National Standards Institute (2015). ANSI/AAMI ST91:2015 Flexible and semi-rigid endoscope processing in health care facilities.
4 Society of Gastroenterology Nurses and Associates (2012). Standards of Infection Control in Reprocessing of Flexible Gastrointestinal Endoscopes. Disponible : https://www.sgna.org/Portals/0/Education/PDF/Standards-Guidelines/sgna_stand_of_infection_control_0812_FINAL.pdf
5 Données de test disponibles.

Document réservé à l'usage des professionnels de santé. Avant toute utilisation, se référer au mode d'emploi. Classe du dispositif : II-a. Ce dispositif est destiné à être utilisé en endoscopie digestive. Les spécifications, la conception et les accessoires peuvent être modifiés sans avis préalable ou obligation de la part du fabricant.



Medivators Inc.
14605 28th Avenue North
Minneapolis, MN
55447-4822 USA
Tel: +1.763.553.3300
Fax: +1.763.553.3387

Medivators BV
Sourethweg 11
6422 PC Heerlen
The Netherlands
Tel: +31.45.5.471.471
Fax: +31.45.5.429.595

Cantel (France) SAS
3 rue du pré fermé
31200 Toulouse
France
Tel: +33 (0) 5.61.24.52.75
Fax: +33 (0) 5.61.24.70.01

Cantel (UK) Limited
Campfield Road
Shoeburyness
Essex
SS3 9BX
UK
Tel: +44 (0) 1702 291878



CONTACT

DUOMED

Duomed Swiss AG
Grenzstrasse 5a, 6214 Schenkon
Tel. +41 (0)41 510 07 00
www.duomed.com

ENDODRY™

Enceinte de séchage et de stockage



DUOMED

Duomed Swiss AG

Grenzstrasse 5a, 6214 Schenkon

Tel. +41 (0)41 510 07 00

www.duomed.com

Sécher et stocker



CANTEL

POUR UN SÉCHAGE ET STOCKAGE ASEPTIQUE ET SÉCURISÉ DES ENDOSCOPES

ASSUREZ-VOUS QUE VOS ENDOSCOPES FLEXIBLES RESTENT PROPRES ET SECS PENDANT LE STOCKAGE

L'Enceinte de Séchage et de Stockage pour Endoscopes flexibles ENDODRY™ force l'air filtré à travers tous les canaux de l'endoscope.

- La ventilation continue régule la température et élimine l'humidité résiduelle pouvant entraîner la prolifération bactérienne.
- La circulation d'air sec hautement purifié (ISO 85731:2010) filtré à travers chaque canal de l'endoscope et autour de la gaine extérieure garantit que l'endoscope soit sec avant utilisation.
- Un cycle de séchage court permet un taux de disponibilité rapide des endoscopes.

PROTÉGEZ VOS ENDOSCOPES FLEXIBLES DE DES DOMMAGES

Système de cassettes rigides évitant l'oscillation libre de l'extrémité distale et protégeant l'endoscope durant le transport et le stockage.

- Le transport des endoscopes flexibles dans des cassettes réduit les dommages causés aux endoscopes et les réparations consécutives de 25 à 30 %
- Transfert rapide et efficace du laveur-désinfecteur d'endoscopes (LDE) à l'enceinte de stockage par le biais d'un système de cassettes

PARAMÉTRÉZ VOS ENCEINTES SELON VOS BESOINS

La conception compacte propose différentes configurations conformes aux exigences de chaque établissement.

- Disponible en modèles simple porte ou traversant (porte avant et arrière) pour favoriser la marche en avant.
- Cassettes et connecteurs compatibles avec le LDE ADVANTAGE™ PLUS et DSD™ pour améliorer l'efficacité de votre service.

MAXIMISEZ LA SÉCURITÉ DES PATIENTS

L'enceinte de séchage et de stockage utilise une cassette pour diminuer les contacts avec l'endoscope et les risques de contamination croisée.

- La réduction de la manipulation par les opérateurs atténue la recontamination de l'endoscope et optimise le contrôle des infections.
- L'absence de connexions répétées des canaux de l'endoscope permet un gain de temps.
- Voyants intelligents (vert, bleu, rouge) pour une identification rapide du séchage de l'endoscope.

L'ARCHIVAGE DES DONNÉES PERMET UNE TRAÇABILITÉ DU CYCLE DE SÉCHAGE DE L'ENDOSCOPE DU CYCLE DE SÉCHAGE DE L'ENDOSCOPE

Surveillance en continu des données pour des informations détaillées sur l'état de séchage de tous les endoscopes.

- La circulation d'air constante contrôle la température et l'humidité dans l'armoire
- Lecteur de code-barres pour faciliter l'identification de l'endoscope et l'emplacement du plateau de l'endoscope; écran tactile pour une visualisation rapide
- Interface de données SMART Connect avec le LDE, ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru et le logiciel CANEXIS™ solution de flux de travail intégré pour l'archivage des données et la traçabilité de l'endoscope.

LE CERCLE COMPLET DE PROTECTION

En tant que chef de file mondial en matière de prévention des infections, seul Cantel offre le **Cercle Complet de Protection**, un partenariat proactif à valeur ajoutée qui vise à vous aider à éliminer les risques, à rationaliser l'efficacité opérationnelle et à optimiser votre réussite.

SÉCHER ET STOCKER La croissance bactérienne présente un risque important pour les endoscopes pendant la période de stockage. Nos solutions de transport, de séchage et de stockage sont conçues pour protéger les endoscopes, réduire la contamination croisée, éliminer l'humidité dans les canaux et contrôler l'humidité. On sait qu'un taux d'humidité plus élevé ou une humidité dans les canaux de l'endoscope favorise la croissance bactérienne.



ENDODRY™

Enceinte de séchage et de stockage

Écran tactile couleur pour une identification rapide du temps de stockage de l'endoscope



SMART Connect vers le LDE ADVANTAGE PLUS™ et logiciel CANEXIS™ solution de flux de travail intégré

Les portes verrouillables protègent les endoscopes

Disponible dans les configurations de porte oscillante gauche ou droite



Lecteur de codes-barres pour faciliter l'identification de l'endoscope et de l'opérateur



Compatible avec le LDE ADVANTAGE PLUS™ Pass-Thru et DSD™ pour améliorer l'efficacité de votre service



Cassette de transport réduisant la manipulation et aidant à prévenir les dommages et les risques de contamination de l'endoscope

Modèles traversants ou à une seule face disponibles



CARACTÉRISTIQUES DE L'ENCEINTE DE SÉCHAGE ET DE STOCKAGE ENDODRY™

Exigences électriques

100-240 V c.a., 50/60 Hz, puissance absorbée : 75 W,
Fusible : T2A (dispositif interne) 15 A (circuit)

Certifications de sécurité électrique

CEI 61010-1:2010

Température de fonctionnement

10 - 40 °C (50 - 104 °F)

Interface

RJ45 (10/100 Mbps)

Dimensions

190 H x 60 L x 54 P (cm)
75 H x 24 L x 22 P (pouces)
Portes oscillantes 52 cm (20,5 pouces)

Poids


170 kg (375 livres)

Traçabilité de l'endoscope

Logiciel de gestion de flux de travail
CANEXIS™

Exigences relatives à l'air

ISO 8573-1:2010 min. class 1.4.1
(consulter les documents techniques)

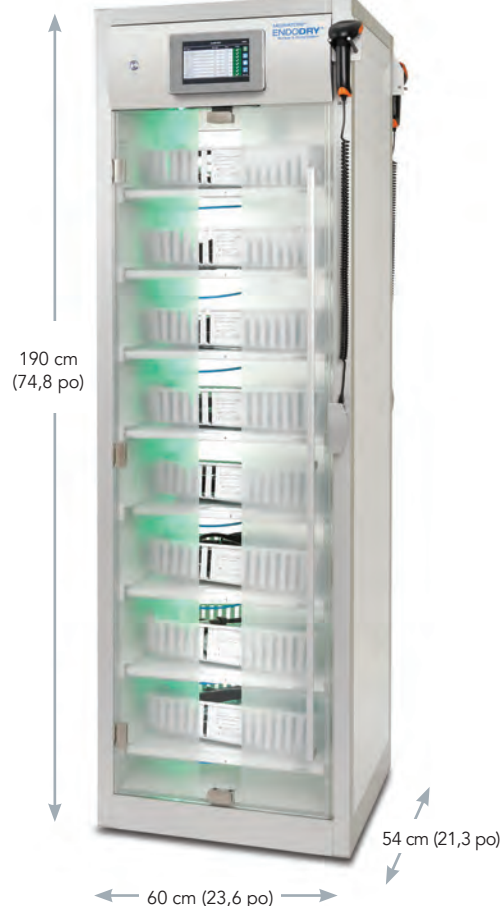

INFORMATIONS DE COMMANDE DE L'ENCEINTE ENDODRY™

NUMÉRO DE MODÈLE	DESCRIPTION
15122, 15123, 15124, 15125**	LDE ADVANTAGE PLUS™ – Pass-Thru (Modèle traversant)
15120, 15121*	LDE AVANTAGE PLUS™ - Entrée simple face
CAS-1000	Cassette de transport de l'endoscope
14558	Cassette en métal pour l'endoscope

Disponible dans les configurations de porte oscillante gauche ou droite

* Connecteurs vendus séparément.

ADVANTAGE PLUS™, ENDODRY™, CANEXIS™ and DSD™ are trademarks Cantel Medical Corp., its affiliates or related companies. All other company and product names are trademarks of their respective owner.

© 2017-2022 Cantel. All Rights Reserved. The Complete Circle of Protection diagram is a trademark owned by Cantel Medical Corp. and is subject to copyright protection owned by Cantel Medical Corp.

www.cantelmedical.eu

Medivators BV | t: +32 (0)38 080 707 | e: csnl@medivators.com

© 2022 Cantel Medical Corp. LIT-00240/B-FRBE





CLEANASCOPE®

Systèmes de transport mobiles pour les endoscopes flexibles et accessoires sensibles.


Stérile – économique – sûr.

Systèmes de transport pour les endoscopes CleanaScope




Le CleanaScope représente un système breveté, idéal pour le transport et le stockage à court terme des endoscopes. Il vous permet ainsi de transporter plusieurs équipements simultanément, grâce à ses bacs. L'utilisation des trois films protecteurs de transport stériles, avec un code de couleur, soit transparent, vert ou rouge, à usage unique, simplifie énormément le processus de travail.


Un premier film transparent se dépliant sur la base de l'intérieur de chaque bac de transport, avant d'y placer les endoscopes propres et prêts à l'emploi, que l'on couvrira de suite d'un deuxième film vert, avant le transport dans les salles d'examen. « Vert... propre » Ce même bac servira pour assurer le retour des endoscopes contaminés, dans les zones de nettoyage, sur lequel il sera placé alors un film rouge, signalant ainsi qu'il a bien été contaminé. « Rouge... contaminé »

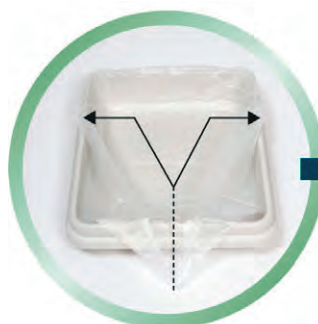

Déposez la feuille stérile, film transparent dans le bac de transport, dépliez cette feuille par dessus les bords du bac de transport de manière à recouvrir toute la surface.

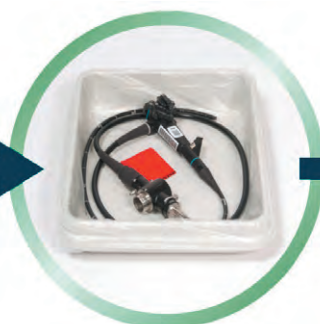

Placez l'endoscope fraîchement désinfecté dans le bac de transport y compris avec la feuille rouge pour un usage ultérieur.

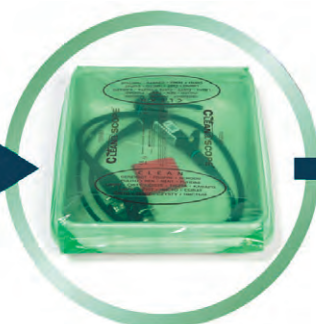

Recouvrez et fermez le bac de transport avec la feuille de protection verte pour assurer une utilisation propre. Repoussez le bac comme un tiroir dans le chariot de transport.



Après l'examen et le pré nettoyage avec l'Neutra-Flush remettez l'endoscope dans son bac de transport et recouvrez le avec la feuille rouge indiquant «contaminé».

Bacs, films stériles et chariot mobile pour le transport, **CleanaScope**



Ce système complet avec le chariot, les bacs de transport ainsi que les films à usage unique vous garantit une vraie barrière contre les risques de contamination. Le matériel contaminé ne se trouve plus directement placé sur les fonds des bacs de transport, mais sur les films protecteurs et les bacs sont placés sur des tiroirs dans le chariot. Ainsi, la collecte, la préparation et le nettoyage complet des instruments durant la journée, se fait de façon optimale, soulageant le personnel en endoscopie.

	Référence	Description	Chariot nombre de bacs	Dimensions h x l x p (mm)	Qté
	CLS-2	Bac de transport pour le CleanaScope® chariot mobile		intérieure 95 x 370 x 475 extérieure 100 x 425 x 525	1
	CLS-4	Couvercle de bac de transport (CLS-2)		25 x 410 x 510	1
	CLS-5	Set des films stériles CleanaScope® (transparent, vert et rouge) boîte à 200 pcs			200
	CLS-8	CleanaScope® Distributeur mural pour des films stériles avec matériel de montage			1
	CLS-5.5	CleanaScope® chariot mobile Chariot complet, comprend le chariot et 5 bacs (CLS-2)	5	800 x 520 x 570	1
	CLS-6.6	CleanaScope® chariot mobile Chariot complet, comprend le chariot et 6 bacs (CLS-2)	6	925 x 525 x 560	1
	CLS-10.10	CleanaScope® chariot mobile Chariot complet, comprend le chariot et 10 bacs (CLS-2)	10	1435 x 525 x 560	1
	CLS-3	Couvercle de chariot dessus (toptray) pour le CleanaScope® chariot mobile		intérieure 20 x 365 x 465 extérieure 35 x 505 x 555	1

Bacs, films stériles et chariot mobile pour le transport, **CleanaScope Advantage**



Ce système complet avec le chariot, les bacs de transport ainsi que les films à usage unique vous garantit une vraie barrière contre les risques de contamination. Le matériel contaminé ne se trouve plus directement placé sur les fonds des bacs de transport, mais sur les films protecteurs et les bacs sont placés sur des tiroirs dans le chariot. Ainsi, la collecte, la préparation et le nettoyage complet des instruments durant la journée, se fait de façon optimale, soulageant le personnel en endoscopie.

	Référence	Description	Chariot nombre de bacs	Dimensions h x l x p (mm)	Qté
	CLS-ADV-2	Bac de transport pour le CleanaScope® Advantage chariot mobile. Les endoscopes grands et la cassette Advantage Plus® s'insèrent dans les bacs stables et réutilisables.	extérieure	123 x 466 x 508	1
	CLS-ADV-4	Couvercle de tiroir de transport (CLS-ADV-2)		25 x 410 x 510	1
	CLS-ADV-5	Set des films stériles CleanaScope® Advantage (transparent, vert et rouge) boîte à 200 pcs			200
	CLS-ADV-8	CleanaScope® Advantage Distributeur mural pour des films stériles avec matériel de montage			1
	CLS-ADV-5.5	CleanaScope® Advantage chariot mobile Chariot complet, comprend le chariot et 5 bacs (CLS-ADV-2)	5	881 x 640 x 561	1
	CLS-ADV-6.6	CleanaScope® Advantage chariot mobile Chariot complet, comprend le chariot et 6 bacs (CLS-ADV-2)	6	1029 x 640 x 561	1
	CLS-ADV-10.10	CleanaScope® Advantage chariot mobile Chariot complet, comprend le chariot et 10 bacs (CLS-ADV-2)	10	1613 x 648 x 561	1